

# TECHNIKAI ÚTMUTATÓ

## génbanki DNS vizsgálatok mintavétele

- A szájnyalukahártyáról történő mintavétel előtt fél órával az állatot ne etessük és ne itassuk.
- A pofa környéke ne legyen szennyezett.

### Haszonállat-génmegőrzési Központ

2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.

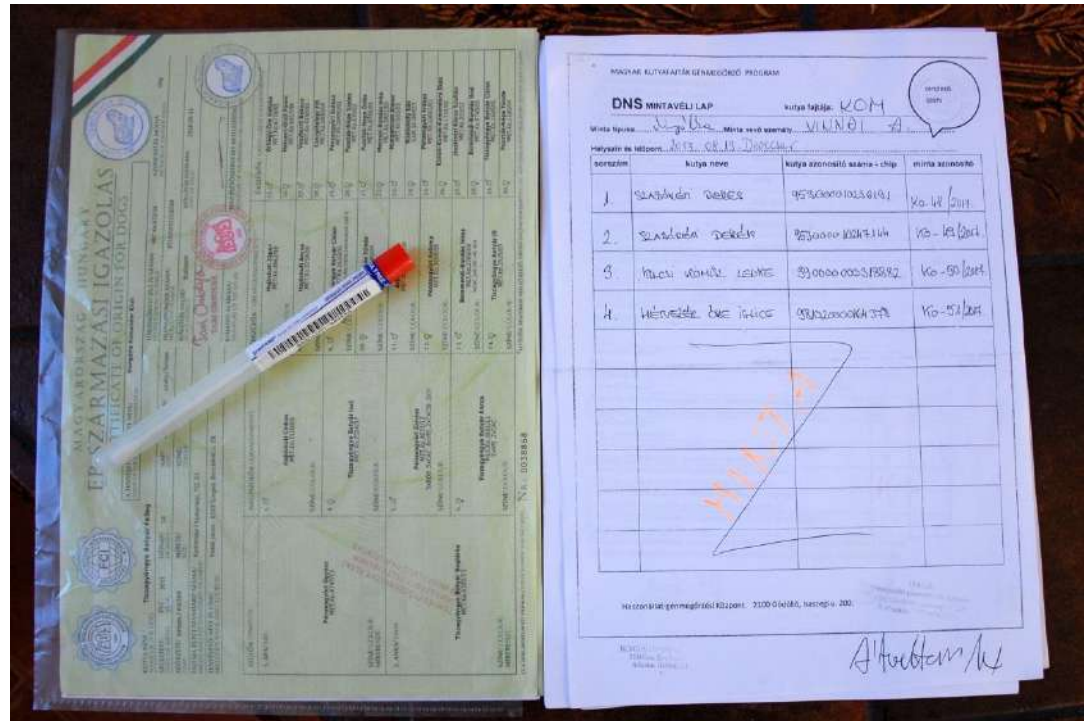


## Technikai eszközök:

1. Egyedileg azonosítható speciális mintavételi pálca
2. Egyszer használatos kesztyű
3. Mintatartó szárítóállvány vagy pohár
4. Kutya azonosításához chipleolvasó
5. Szükséges dokumentációk



- Chipszámmal vagy tenyésztőszervezeti sorszámmal azonosított mintavételi egység
- Származási lap ( másolat )
- DNS mintavételi összesítő lap





- Tenyésztőszervezet által sorszámozott minta
- Fajta rövidített jelölése (KOM)
- Minta sorszám / mintavétel éve
- Fajta rövidítések:

Komondor – KOM

Kuvasz-KUV

Puli-PUL

Pumi-PUM

Mudi-MUD

Magyar agár- MAG

Erdélyi kopó- KOP

Rövidszőrű magyar vizsla-RVI

Drótszőrű magyar vizsla-DVI



# Beleegyező nyilatkozat

  
**Hungária Komondor Klub**  
2364 Ócsa, Elm János u. 48.  
Tel.: 06/309 133018 E-mail: hkomondor@gmail.com  
www.komondorklub.hu

**BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT**

komondor DNS mintavételbe, DNS bankban való tárolásba, genetikai vizsgálatba

Alulírott, Hegedűs Csilla beleegyezem, hogy a tulajdonomban lévő Hérvezői Óra Iglice nevű, 981020000164378 chipszámú komondor kutyát biológiai mintájából DNS-citolízist, tárolhatók, és későbbiekben a DNS-mintából genetikai vizsgálat végezhető.

A DNS-minta és az adatok a Hungaria Komondor Klub megbízásából létrehozott DNS-bankban, a Hazonállat-Génmegőrzési Központban, ill. adatbázisában tárolhatók a megfelelő biztonsági és adatvédelmi rendelkezések mellett.

Tájékoztattam arról, hogy a beleegyező nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom a tulajdonomban lévő komondor DNS-mintáját írásbeli kérelemre, a Hungaria Komondor Klub által jóváhagyva megszüntetik.

Tudomásul veszem, hogy személyemet illető információk bizalmasan kezelendők. Személyes adataimat a Hazonállat-Génmegőrzési Központ nem bocsáthatja más rendelkezésére addig, amíg arról külön írásban nem nyilatkozom.

Devecser, 2017. augusztus 19.

Hegedűs Csilla  
Tulajdonos neve

  
Tulajdonos aláírása

Hungaria Komondor Klub

  
Képviselő aláírása



# Mintavételi jegyzőkönyv

HUNGÁRIA KOMONDOR KLUB  
MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV  
Genetikai mintavétel szájnyalakártyáról  
Buccal sample for genetic analysis

Minta sorszáma: \_\_\_\_\_  
Sample No: KO

Kutya törzskönyvi neve: \_\_\_\_\_  
Name of the dog: Hévezér Óra Iglice

Kutya neme: \_\_\_\_\_  
Sex of the dog: szuka

Törzskönyv száma: \_\_\_\_\_  
Pedigree No.: MET Ko. 873/17

Kutya chip száma: \_\_\_\_\_  
Identification (chip) No.: 98102000164378

Kutya tulajdonosának neve: \_\_\_\_\_  
Name of the owner of the dog: Hegedűs Csilla

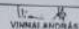
Kutya tulajdonosának lakcíme: \_\_\_\_\_  
Address of the owner of the dog: 8360 Keszthely, Keszthelyi u. 13.

Kutya tulajdonosának E-mail címe: \_\_\_\_\_  
Email address of the owner of the dog: hcilla12@gmail.com

Származási lap fénymásolata: \_\_\_\_\_  
Copy of pedigree: \_\_\_\_\_

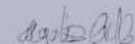
Mintavétel helye: \_\_\_\_\_  
Place: Devecser


Mintavétel dátuma: \_\_\_\_\_  
Date: 2017.08.19

Mintavevő neve: \_\_\_\_\_  
Name of sampler:  VINNAI ANIKÓS

Alulírott, mint a fent nevezett az eb tulajdonosa hozzájárulok I, undersigned owner of the dog mentined above, contribute to	Igen yes	Nem no
- a mintavételhez; - the sample collection;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- a minta genetikai vizsgálatához populációgenetikai elemzésekhez; - the use of the sample in population genetic analysis;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- a minta genetikai terheltségekre irányuló vizsgálatához; - the use of the sample for testing genetic disorders;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- a minta származásellenőrzésben való felhasználásához; - the use of the sample in procedures for origin control;	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- a minta egyéb, tudományos kutatásokban való felhasználásához; - other scientific uses of the sample.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A vizsgálati eredményeket nem használjuk fel a mintát adó egyed rossz hírének keltésére.  
The results of the test shall not be used to endanger the reputation of the particular dog.

  
az eb tulajdonosának aláírása

  
mintavevő aláírása

## Egyedi azonosítás ellenőrzése





- Egyszer használatos kesztyű viselése a mintavétel során indokolt az esetleges szennyeződések elkerülése végett.
- A biztonságos mintavételhez nyugtassuk meg a kutyát és megfelelően rögzítsük.
- Az ajkak széthúzásával tegyük szabaddá a nyálkahártya felületeket.



- A mintavevő tampont erőteljesen többször dörzsöljük végig a felső molaris fogak felett az állcsonton
- Jobb és bal oldalról is vegyünk egy-egy mintát- két mintavevő pálcát használjunk fel.



- Dörzsölés közben a felső szájszéleket szorítsuk a mintavevő tamponra, annak érdekében, hogy minél több hámsejt kerüljön a mintavevőre.



- Mintavétel után szárítsuk be a mintákat , kerüljük a a tűző napot.
- 10-15 percig ne zárjuk le dugóval csövet (addig is szárad)





Egy azonosított csőbe  
helyezzük a két mintát ( az  
egyik pálcát letörjük a  
dugóról).



- Minták gyűjtése tárolása tenyészszelemlén szállításig
- A laboratóriumba juttatás lehetőség szerint minél előbb történjen meg személyesen vagy postai úton
- Átmeneti tárolás háztartási hűtőszekrényben

